



Nuovo Narcotest Multi_Drug Test Wipetect_x94™ Per indagini su Superfici, Polveri, Solidi, Sudore, Pelle

Con un semplice procedimento non invasivo si garantisce:

- ❖ Facile esame su superfici
- ❖ Rapidissimo risultato (2 minuti)
- ❖ Precisione ed attendibilità al 100%
- ❖ Indagine di 9, 4, 3 o 1 gruppo di sostanze stupefacenti
- ❖ Pannello integrato per analisi simultanea di più sostanze (o singola)
- ❖ Protezione della banda del test (anti adulterazione)
- ❖ Risultati interpretabili a vista o con lettore per stampa oggettiva
- ❖ Reagente innocuo
- ❖ Lettore per Stampa e gestione dati (opzionale)
- ❖ Abilitato ad uso forense



(la presente versione sostituisce il vecchio narcotest)

Analisi in soli 2 minuti di:

WipeTect_X 94: *

Cocaina/Crack
Oppiacei / Eroina
Marijuana / Cannabis
Ecstasy
Amfetamine
Metanfetamine
Ketamina
Acido Diet.Lisergico
Metilfenidato

COC
OPI/MOP
THC /Δ⁹-THC(Hashish)
MDMA
AMP
MET
KET
LSD
MPD



Wipetect_X 34:

Cocaina/Crack
Oppiacei / Eroina
Marijuana / Cannabis

COC
OPI/MOP
THC /Δ⁹THC(Hashish)

(Pannello stupefacenti personalizzabile su ordine minimo di 300 kit multitest)

- Confezionamento: 25 Pannello/Multi test per test multipli (n.40 test singola sostanza)
 25 Flaconi di reagente innocuo (n.40 test singola sostanza)
 04 Catena di custodia per trasferimento del reperto sospetto di cui:
- Flacone speciale per la conservazione del reperto
 - Sigilli anti_effrazione con doppia matrice per tracciabilità
 - Busta ermetica per trasporto ed antieffrazione UNI 3373

*) Disponibilità immediata



13485:2003

FOR FORENSIC USE ONLY



9001:2008





Istruzioni Rapide per l'uso del Narcotest _Wipetect_X94 o X44 o X34

Metodo diretto:

(in abbondanza del reperto d'indagine)

- ❖ Estrarre il cappuccio dal pannello/test
- ❖ Raccogliere la sostanza con il cappuccio del pannello/test
- ❖ Aprire il flacone del reagente ed Inserire una porzione di reperto nel flacone e agitare il flacone
- ❖ Versare il reagente nel cappuccio e Reinserire il cappuccio nel pannello/test, in posizione verticale al piano; dopo 2 minuti il reagente migrerà in ogni banda del test ed emetterà una o due righe
- ❖ Mantenere in verticale il pannello(base in basso)
- ❖ Attendere 1-2 minuti e leggere il risultato(vedi tabella)



Metodo indiretto:

(con scarsa quantità del reperto d'indagine)

- ❖ Estrarre il cappuccio dal pannello/test
- ❖ Aprire il flacone reagente e lasciare cadere 4 gocce sull'oggetto o superficie
- ❖ Raccogliere la sostanza strusciando tutte le stringhe del pannello sull'oggetto
- ❖ Inserire nel flacone del reagente(se possibile) il reperto ed agitare il flacone
- ❖ Inserire il reagente nel cappuccio
- ❖ Inserire il cappuccio nel pannello/test (con le estremità delle strisce all'interno)
- ❖ Mantenere in verticale il pannello (base in basso)
- ❖ Attendere 1-2 minuti e leggere il risultato



Interpretazione dei risultati per ogni banda:

