

# L'efficacia nei controlli sull'abuso di DROGHE ed ALCOOL



*Ai test già presenti in commercio distribuiti dall'azienda umbra Alcooltest Marketing Italy si aggiunge il nuovo Oratect HM15 Wipe Tect™ Drug Test. Grazie ad un procedimento semplice e rapido, garantisce un risultato attendibile con validità ad uso forense e risposta medico-legale inviata tramite PEC in 48 ore*

**P**rocedimenti di analisi rapidi, efficaci, sicuri, in grado di dare la conferma per uso legale nel pieno rispetto delle procedure indicate dal Ministero della Salute. È quanto offre **Alcooltest Marketing Italy**, che distribuisce in tutta Europa i prodotti della Branan Medical Corporation: dispositivi medico-diagnostici per accertare con un solo prelievo l'abuso di sostanze stupefacenti e alcool, garantendo la catena di custodia del prelievo positivo.

Per quanto riguarda gli accertamenti sul consumo di droghe, il modello **Oratect** piccolo, veloce, versatile, semplice da utilizzare, consente agli agenti addetti ai controlli di effettuare il prelievo e, in un minuto di tempo, ottenere a vista il risultato dell'indagine su **sei** gruppi di sostanze stupefacenti (**Cocaina, Oppiacei, Marijuana, Amfetamine, Metamfetamine, Ecstasy**).

È preciso e attendibile al 100%, con validità ad uso forense. Una volta fatto ciò, infatti, è sufficiente estrarre il tampone, inserirlo nella catena di custodia fornita dalla società, sigillare il tutto e telefonare al numero verde per prenotare l'arrivo del corriere che ritirerà il campione. Il laboratorio convenzionato in esclusiva con Alcooltest Marketing Italy consente una risposta entro 48 ore su tutto il territorio nazionale e in 5 giorni per i Paesi europei.

A proposito dei controlli sull'abuso di alcool, poi, la società propone il nuovo e velocissimo precursore per alcool **alcotest\_031** (alcohol-blow). Esso garantisce risultati immediatamente visibili su display da 0,00 g/l a 4,00

g/l, con un sistema di campionamento brevettato a basso consumo energetico (0,5 W), tempo di campionamento di circa 0,5 secondi e una memoria fino a 50 record di test con data e ora.

In merito a questo tipo di accertamenti, va ricordato che la recente giurisprudenza ha tenuto in grande considerazione il metodo sintomatologico, che acquisisce quindi notevole valore in tribunale.

Per questo motivo è bene tener presenti nell'accertamento anche i "sintomi nascosti", che possono manifestarsi anche dopo 3 o 6 ore dall'abuso.

A questa distanza di tempo i sintomi riscontrabili da un agente o da un medi-

## CATENA DI CUSTODIA PER LA CONSERVAZIONE DEL TAMPONE:

- Tampone sfilabile (contenente saliva)
- Flacone speciale per la conservazione
- Sigilli antieffrazione con doppia matrice per tracciabilità
- Busta ermetica per trasporto ed antieffrazione EN 3373
- Verbale di prelievo ed indirizzo del laboratorio pre-compilato



co non sono più chiaramente visibili e proprio per questo motivo è necessario avvalersi del supporto di un efficace e attendibile test rapido.

soggetto fermato, ma spesso in difficoltà per l'assenza di un medico o di un ausiliario sanitario interno al Comando in grado di trasferire il materiale prelevato in laboratorio. Altrettanto **sem-**  
**plici** sarebbe abilitare i propri agenti a queste procedure con uno specifico corso.

Conoscendo bene queste difficoltà, Alcooltest Marketing Italy propone ai Comandi un servizio completo a 360 gradi nel campo delle diagnosi psicotrope. **Il tutto a costo zero per il Comando**, senza bisogno di spendere nulla in più rispetto al semplice acquisto del test.

Quello offerto da Alcooltest Marketing Italy, quindi, rappresenta un servizio di estrema utilità per gli operatori delle Forze di polizia, autorizzati dal codice della strada al prelievo di saliva del



## ANALISI DI LABORATORIO, TRASFERIMENTO PRELIEVO E RISPOSTA MEDICO LEGALE:

- Validità ad uso forense
- Ritiro prelievo presso il Comando entro 8 ore dalla chiamata
- Procedure di laboratorio indicate dal Ministero della Salute
- Analisi di laboratorio LC/MS e risposta medico legale via PEC in 48 ore
- Conferma dei risultati tramite HRGC/MM/MM/ECC/MM
- Laboratorio: Autorizzazione 7p/302 dell'8/10/2009 Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche sociali

## IL PARERE DI CHI UTILIZZA I TEST ORATECT

### PIER GIUSEPPE ROSSI, Comandante PM Alessandria:

"Utilizziamo quotidianamente questi test, soprattutto nell'ambito dell'infortunistica stradale. Ci troviamo molto bene: dopo qualche incertezza iniziale legata alla novità dello strumento abbiamo iniziato ad usarlo e non abbiamo mai avuto problemi né difficoltà particolari. Rappresenta certamente un valido aiuto per accertare lo stato di alterazione psicofisica dei conducenti".

### STEFANO ROSSI, Comandante PM Ravenna:

Nel ravennate è stato avviato il protocollo *Drugs on Street*, per un capillare controllo di polizia stradale incentrato sulla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e/o stupefacenti. Gli operatori erano coadiuvati da personale medico-sanitario per lo screening di droghe nel fluido orale sui conducenti.

L'utilizzo dei tamponi *OratectXP*, dispositivo immunoenzimatico a un solo step e flusso laterale nel fluido orale umano, risulta di semplice utilizzo e anche l'impatto sugli utenti è stato visibilmente positivo.

Dai controlli effettuati, i conducenti invitati ad utilizzare il tampone orale per lo screening vi si sono sottoposti senza indugi, mostrando visibile stupore per l'avanguardia e tipologia dei controlli.

Alcooltest Marketing Italy Srl

Via J.F. Kennedy, 8 - 06083 Bastia Umbra (PG)

Tel. 3398282019 - Fax 0758012645

www.alcooltest.org - alcooltest@alcooltest.org